

Wycielacze i akcesoria

Jak rozpoznać zbliżający się poród?


Krowa zaczyna być niespokojna, poszukuje miejsca z dala od stada, rozluźniają się jej więzadła miednicze. Ponadto jej srom staje się obrzmiały, z opuszczonych i rozchylonych warg sromowych wydobywa się gęsty, przezroczysty śluz.

Wraz z rozpoczęciem pierwszej fazy porodu niepokój zwierzęcia wzrasta, krowa na przemian wstaje i kładzie się, rozgląda na boki, ryczy, oddaje często kał i mocz.

Co może wpłynąć na przebieg porodu?


- kondycja krowy
- ilość poprzednich porodów (wieloródki - 3-5% ciężkich porodów, pierwiastki - 10-20% ciężkich porodów)
- wielkość płodu, powierzchnia kanału miednicy i ich wzajemny stosunek
- przygotowanie hormonalne krowy do porodu
- zdolność do rozszerzania się miednicy podczas porodu
- aktywność mięśniówki macicy
- płeć cielęcia
- wymiary i położenie cielęcia
- ilość płodów
- ustawienie zadu krów

„Podejmujemy akcję jedynie w przypadku przedłużającego się porodu lub innych komplikacji.”

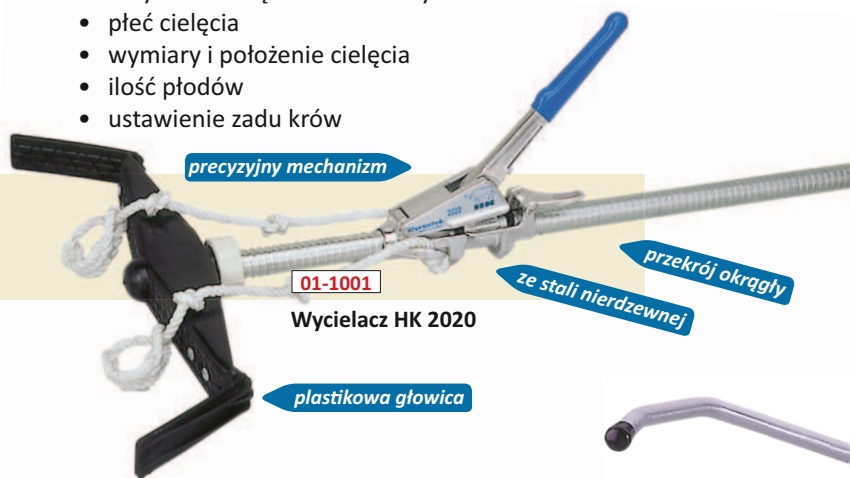

Zakup wycielacza jest ekonomicznie opłacalny już przy stadach mających powyżej 20 sztuk bydła mlecznego. Na rynku jest obecnie dostępnych wiele typów wycielaczy, jednak ich najważniejsze parametry są podobne: mają prowadnicę o długości ok. 180 cm, a głowicę (część opierająca się na biodrach krowy) o długich ramionach, stabilizujących całe urządzenie podczas wycielenia.

Dzięki takiej budowie wycielacz nie ześlizgnie się, pomimo zmiany pozycji krowy, np. gwałtownego położenia się. Istotną sprawą jest możliwość wyciągania cielęcia naprzemiennie za nóżki, w przypadkach porodów wymagających pomocy najbardziej efektywne jest właśnie takie działanie.

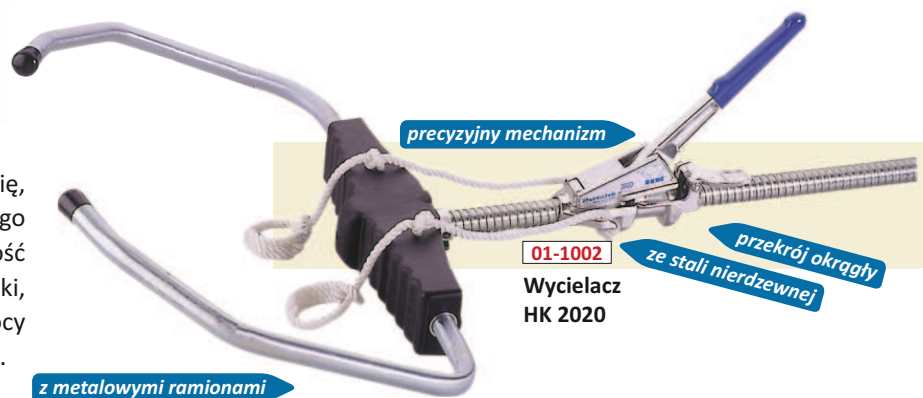



„Krowa powinna co najmniej 2 tygodnie przed wycieleniem przebywać w porodówce, by jej organizm mógł wytworzyć odpowiednie przeciwciała.”

Przy położeniu głowkowym cielęcia należy spokojnie obserwować poród, a interweniować w razie braku postępu w porodzie lub wystąpienia komplikacji. Szybciej musimy przyjść na pomoc przy porodzie pośladkowym. Przy takim ułożeniu płodu cielę może swoim ciężarem docisnąć sznur pępowiny do ściany macicy i odciąć sobie dopływ tlenu. Cielę próbuje wtedy oddychać samo, zanim jego główka znajdzie się na zewnątrz, dochodzi wówczas do uduszenia. Wtedy interwencja człowieka jest niezbędna, a użytecznym narzędziem staje się wycielacz.



Zamawiam

01-1001	HK wycielacz z mechanizmem 2020	z plastikowymi wspornikami, długość 180cm	 1
01-1002	HK wycielacz z mechanizmem 2020	z metalowymi wspornikami, długość 180cm	 1



Wycielacze i akcesoria

Postępujemy zgodnie z fizjologią porodu - ciągniemy za rączki cielęcia tylko w czasie skurczów. Najbardziej efektywne jest wyciąganie naprzemiennie, raz za jedną, raz za drugą nóżkę. Najpierw ciągniemy wzdłuż linii kręgosłupa, po pojawieniu się główki (lub zadu) ciągniemy lekko w dół.

Przedłuża się pierwsza faza porodu, a pęcherz płodowy nie pojawił się

Wydostały się nóżki, pękł pęcherz płodowy, a brak postępu w porodzie

Sprawdzamy, czy nie doszło do skrętu macicy - wprowadzamy czystą, zdezynfekowaną rękę do pochwy macicy i sprawdzamy, czy fałdy błony śluzowej pochwy są spiralnie ułożone


Sprawdzamy położenie cielęcia

Wyznaczając drogę płodu oś miednicy cechuje skomplikowany i dwukrotnie załamany przebieg. Jeśli położenie płodu jest prawidłowe (lub usunęliśmy nieprawidłowości), przy dalszym braku postępów w porodzie, zakładamy zdezynfekowane linki porodowe tuż za stawami pięcinowymi cielęcia i ciągniemy za nie w rytmie skurczów porodowych. Najpierw ciągniemy wzdłuż linii kręgosłupa, a gdy pojawi się główka lub zad, ciągniemy lekko w dół. Zawsze trzeba pamiętać o ochronie krocza krowy gdy ukaże się główka, należy równomiernie naciskać na krocze, spychając je na główkę cielęcia. Cielę należy wyciągać z wyczuciem, ponieważ nadużywanie siły i ciągnięcie poza skurczami porodowymi może doprowadzić do wypadnięcia macicy, pęknięcia krocza lub uszkodzenia oseska. Stosowanie żelu VetGel znacznie ułatwia czynności związane z porodem.


„Nie wolno przebijać pęcherza płodowego, żeby przyspieszyć poród. Trzeba czekać, aż pęknie sam!”

„Jeżeli zaczniemy wyciągać cielę bez sprawdzania położenia, możemy spowodować skręcenie główki cielęcia do tyłu, gdyż w tej fazie porodu nie przedostała się jeszcze przez miednicę. Takie zablokowanie może uniemożliwić dalszy poród.”


Prawidłowe ułożenie płodu

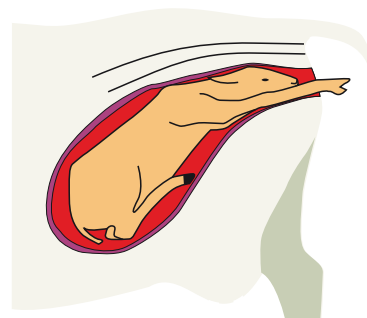

główkowe

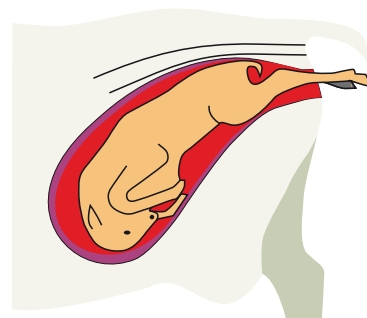

pośladkowe

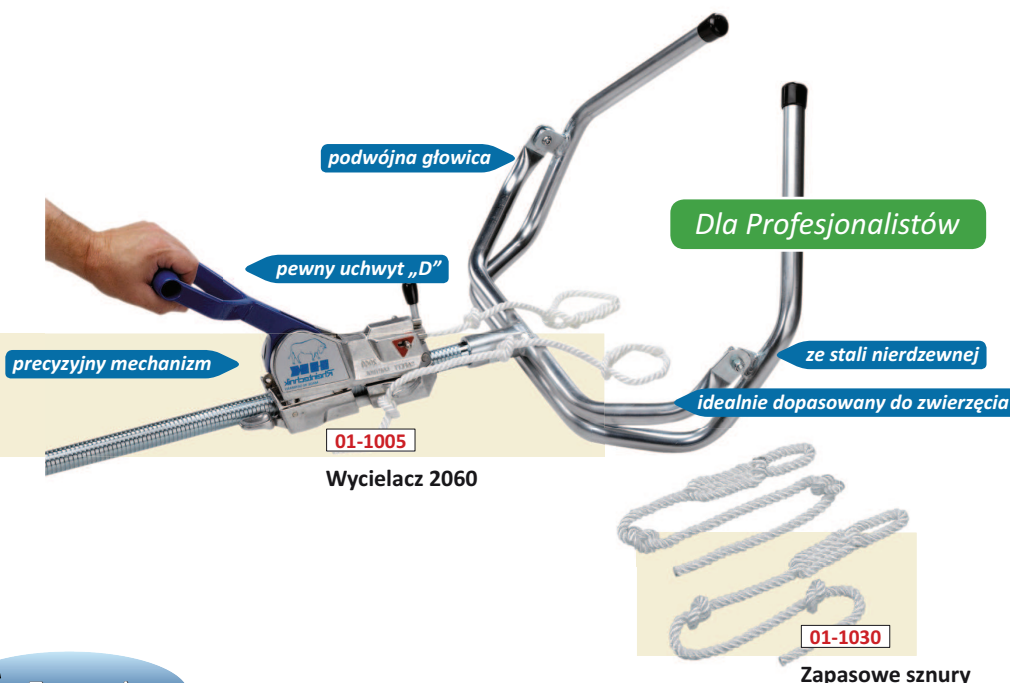

Zamawiam

01-1005	Wycielacz 2060 z podwójną główką	szerokość ramy FLEXI 52cm, długość 180cm	1
01-1006	Wycielacz 2060 z podwójną główką	szerokość ramy FLEXI 57cm, długość 180cm	1
01-1030	Zapassowe sznury	2 sztuki w komplecie	1 / 5 / 100



Wycielacze i akcesoria


Pierwsza pomoc dla cielęcia:

- uniesienie cielęcia za tylne kończyny do góry – powoduje to samoistne wypływanie wód płodowych oraz, na skutek przekrwienia mózgowia, pobudza ośrodek oddechowy
- gdy występują słabe oznaki oddychania, należy energicznie (ale z wyczuciem) uderzyć cielę dłonią po pysku, by pobudzić system nerwowy
- pobudzenie ośrodka oddychania, np. przez chluśnięcie zimną wodą na głowę i klatkę piersiową, a następnie szybkie osuszenie cielęcia słomą
- kilkukrotne uderzenia płaską dłonią po bokach klatki piersiowej
- stosowanie sztucznego oddychania: kładziemy cielę na grzbiecie, chwytamy za kończyny przednie powyżej pęciny i ruchem półkolistym podciągamy je aż do szyi, następnie podobnym ruchem cofamy je aż do klatki piersiowej, zginając je w ostatniej fazie w stawie nadgarstkowym i przyciskamy do klatki piersiowej; należy powtarzać to przez kilka minut w tempie ok. 25 ruchów na minutę
- zastosowanie środków farmakologicznych, które mają na celu pobudzenie ośrodka oddychania.



01-1031

Linka wycieleniowa

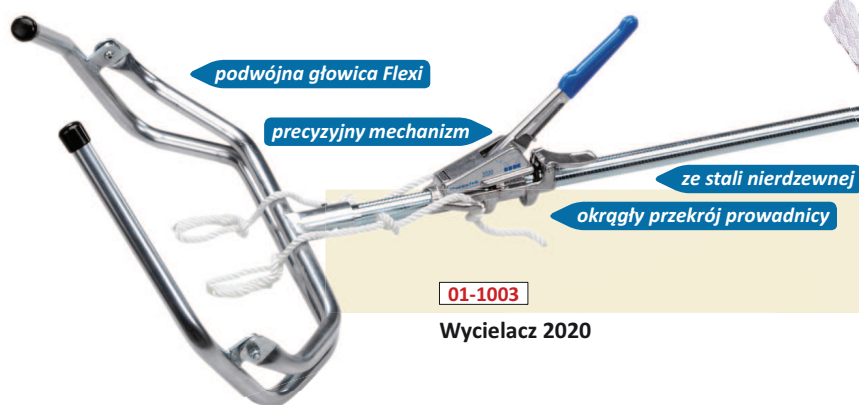

podwójna głowica Flexi


precyzyjny mechanizm

ze stali nierdzewnej

okrągły przekrój prowadnicy

01-1003

Wycielacz 2020

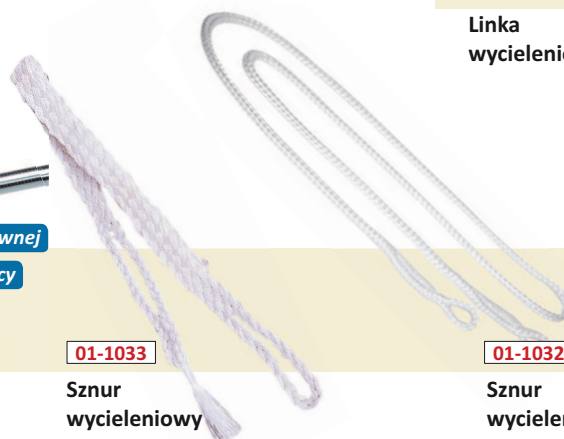

01-1032

Sznur wycieleniowy

01-1032

Sznur wycieleniowy



ze stali nierdzewnej

Trwały i niezawodny

prowadnica o przekroju prostokątnym

podwójna głowica









01-1008

Wycielacz Vink

Rodzaje wycielaczy a sposób wyciągania cielęcia

- 2 haki - pozwalają na symetryczne wyciągnięcie za raciczki - zastosowane w następujących modelach: wycielacze VINK (01-1008, 01-1009), wycielacze 2060 (01-1005, 01-1006, 01-1007), wycielacze Securpart (01-1010, 01-1011)
- 3 haki - umożliwiają naprzemienne wyciągnięcie za raciczki (z opcją zmiany na wyciągnięcie symetryczne) - zastosowane w modelu 2020 (01-1003, 01-1004)

Zamawiam

01-1003	Wycielacz 2020 z podwójną głowicą	szerokość uchwytu FLEXI 52cm, długość 180cm	 1
01-1004	Wycielacz 2020 z podwójną głowicą	szerokość uchwytu FLEXI 57cm, długość 180cm	 1
01-1008	Wycielacz Vink	ze stali nierdzewnej, długość 160cm	 1
01-1009	Wycielacz Vink	ze stali nierdzewnej, długość 180cm	 1
01-1031	Linka wycieleniowa	2 pętle, płasko pleciona	 1 / 10
01-1032	Sznur wycieleniowy	nylonowy, 190 cm	 1 / 10 / 100
01-1033	Sznur wycieleniowy	płaski, 2 małe pętle, na nogi, 125 cm	 1 / 10
01-1008-001	Linka do wycielacza Vink	2 sztuki w komplecie	 1 / 10



Wycielacze i akcesoria




Pierwsza pomoc dla krowy

- krowa po ocieleniu powinna zostać napojona czystą, letnią wodą i pójtem
- obserwacja wydalanego łożyska: powinno zostać wydalone w całości w ciągu 12 godzin po porodzie, jeśli to nie nastąpi, należy wezwać lekarza weterynarii
- po porodzie występuje czasem sytuacja, gdy krowa nie jest w stanie wstać. Warto wtedy dysponować urządzeniem, które pomaga krowie podnieść się na tylne kończyny. Zabezpieczone gumą ramiona podnośnika pozwalają dopasować urządzenie do szerokości zadu krowy. Urządzenie występuje w dwóch rozmiarach: dla krów mlecznych (01-1050) oraz dla krów mięsnych (01-1051).







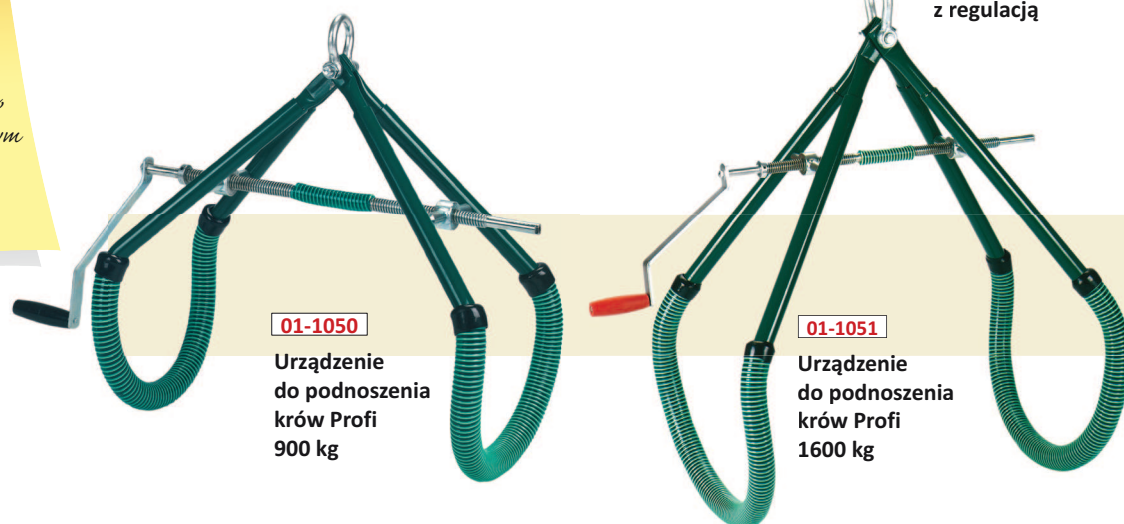

„Prowadnica o przekroju prostokątnym daje możliwość ciągnięcia do przodu i do tyłu, prowadnica o przekroju okrągłym dodatkowo daje możliwość manewrowania na boki”



Poskrom Profi z regulacją



Zamawiam

01-1007	HK wycielacz z mechanizmem 2060	plastikowa głowica z metalowymi ramionami, długość 180 cm	 1
01-1010	Wycielacz Securpart model Standard	plastikowy wspornik, długość 180 cm	 1
01-1011	Wycielacz Securpart model Europa	metalowy wspornik, długość 180cm	 1
01-1050	Urządzenie do podnoszenia krów Profi, do 900 kg	dla małych i średnich krów	 1
01-1051	Urządzenie do podnoszenia krów Profi, do 1500 kg	dla wysokich krów i krów mięsnych	 1
01-1054	Urządzenie do podnoszenia krów Classic, do 800 kg	dla małych i średnich krów	 1
01-1055	Urządzenie do podnoszenia krów Classic, do 1300 kg	dla wysokich krów i krów mięsnych	 1
01-2654	Poskrom Profi z regulacją	pomocny przy podnoszeniu krów	 1 / 2

